

Neofect Flex







Neofect Flex

Der Neofect Flex ist ein Funktionshandschuh, der Menschen mit neurologischen und/oder orthopädischen Beeinträchtigungen dabei unterstützt, den Daumen und die Finger in eine extensorische Haltung zu bringen. Der Handschuh ermöglicht eine einstellbare Streckspannung für die gesamte Hand und kann Nutzern dabei helfen, alltägliche oder therapeutische Aktivitäten einfacher zu bewältigen.

Der Neofect Flex hat ein leichtgängiges Design mit elastischen Fingerbändern, welche eine natürliche Bewegung der Strecksehnen der Finger ermöglichen.

Das proprietäre Spannsystem streckt die Finger und den Daumen des Nutzers nach dem Zugreifen. Ein industrieller Klettverschluss ermöglicht individuell einstellbare Spannungen an jedem Finger, den Grundgelenken sowie dem Handgelenk.

Für eine hohe Atmungsaktivität und Leichtgängigkeit beim Anziehen des Handschuhes sind die Handinnenflächen freigelegt.

Besondere Merkmale

Bei korrekter Anpassung unterstützt der Neofect Flex die Gelenkbewegung, um die grundlegende Funktionsleistung zu maximieren. Die Spannung der elastischen Bänder kann individuell eingestellt werden, um die Finger- und Daumenextension zu unterstützen. Diese ist wichtig, um Gegenstände aus dem Griff des Nutzers zu lösen.

Der Nutzer kann die Stärke der Unterstützung anpassen, damit der Neofect Flex der betroffenen Hand die bestmögliche Funktionalität ermöglicht.



Elastische Fingerbänder lassen individuelle Spannungen an jedem Finger zu.



Chamude Stoff Mit Silikonfingergriff

Verbessert die Passform und Zugkraft während des Greifens und hat antibiotikaresistente Eigenschaften.

Ergonomisches Design für offene Handinnenflächen

Einfache Handhabung und hohe Atmungsaktivität.



Anti-Rutsch Ummantelung

Minimiert das Abrutschen während Übungen oder funktionellen Handbewegungen

Gebrauchsanleitung

Position bei Fingerstreckung

Eine spastische Flexionshaltung kann einen Faustschluss der Hand bedingen. Durch Nutzung der Fingerbänder am Neofect Flex können die Streckmuskeln unterstützt werden und es so ermöglichen, dass das Öffnen der Finger während funktioneller Aufgaben zu erleichtert wird.



*SPASTISCHE
HAND



Funktionelle Handposition

Erreichen Sie eine funktionale Handposition und versuchen Sie unterschiedliche Aktivitäten mit verschiedenen Griffen und Bewegungen zu vollführen, während Sie den Handschuh tragen.

Greifen

Trainieren Sie Ihre Hand, um Objekte mit Leichtigkeit zu greifen.



Fingerspitzen Griff

Trainieren Sie die Feinmotorik Ihrer Finger.

Trage-Anleitung



Schieben Sie Ihre Finger in den Handschuh.



Befestigen Sie das Handgelenksband am Klettverschluss.



Ziehen Sie vorsichtig am MCP-Band und befestigen Sie es an der Rückseite der Hand mit entsprechender Spannung.



Ziehen Sie vorsichtig an den Fingerbändern und befestigen Sie diese auf der Rückseite des Handgelenks mit entsprechender Spannung.

Vorsicht - Bitte sorgfältig lesen

- Nicht im Schlaf tragen.
- Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn nach oder während der Verwendung der Orthese Schmerzen oder Hautausschläge auftreten.
- Stellen Sie die Verwendung der Orthese ein, wenn Sie eine Wunde, einen Hautausschlag oder, ein Ekzem auf Ihrer Haut oder eine Durchblutungsstörung haben.
- Bewahren Sie dieses Produkt an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
- Bitte beachten Sie, dass falsche Lagerung, Verunreinigungen, Verformungen und Schrumpfungen des Produkts aufgrund von Nachlässigkeit keinen Grund für einen Umtausch darstellen.
- Reinigung per Handwäsche in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und Trocknen in gut belüfteter Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine Waschmaschine, chemische Reinigung, Bügeleisen oder Trockner, um das Produkt zu pflegen.

Importeur

Neofect Germany GmbH

Marcel-Breuer-Str. 15
80807 München

Web www.neofect.de

Mail info@neofect.de

Tel 089 59081302

Fax 089 59081200

Hersteller

Neofect CO., LTD.

#801, 42, Changeop-ro, Sujeong-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Korea